


Conveniência e Versatilidade em uma Única Barreira de Pele

FormaFlex é uma solução segura. Basta personalizar e usar.

- É simples de modelar e remodelar para um encaixe perfeito ao estoma
- É projetada para manter o formato e proteger a pele
- É flexível e acompanha os movimentos do corpo

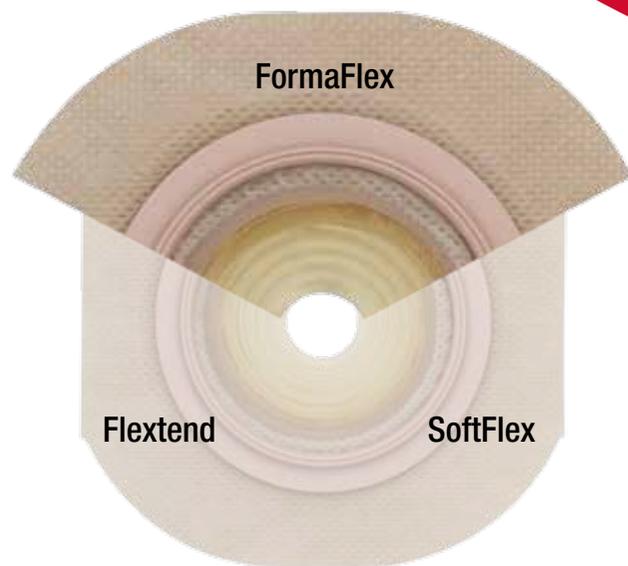

A Barreira FormaFlex – Forma Fácil é uma opção na Linha New Image de barreiras de pele, desenvolvida para atender às necessidades individuais.



A Barreira FormaFlex possui:

- Uma formulação especial que facilita a modelagem manual.
- Flange Flotante integrada – uma tecnologia Hollister - que ajuda reduzir a pressão sobre o abdome.
- Borda adesiva que aumenta a segurança.

A Barreira FormaFlex – Forma Fácil foi desenvolvida para ser usada com o sistema de 2 peças New Image, para bolsas fechadas, abertas ou de urostomia.

FormaFlex – Forma Fácil para uso Prolongado

Informações (Caixa com 05 unidades)

Código do Produto	Código de Cores	Flange	Modelável até
14102	●	44mm	32mm
14103	●	57mm	43mm
14104	●	70mm	57mm

Estomia Hollister. **Os Detalhes Importam.**

Uma Tecnologia Hollister

FormaFlex

Forma Fácil



Simples de Ajustar.



Hollister do Brasil
Av. Jabaquara, 2958
7º andar – cj. 71 a 73
São Paulo – SP
Tel. (11) 5595-9650
Fax: (11) 5505-8699

FormaFlex Forma Fácil

A Hollister apresenta sua nova barreira, com Tecnologia Hollister – **FomaFlex** Forma Fácil. A Barreira Formaflex Forma Fácil foi desenvolvida para oferecer uma solução fácil e conveniente, que proporciona um ajuste personalizado ao estoma.

A Barreira FormaFlex Forma Fácil foi especialmente formulada para manter sua forma após ter sido modelada. É simples de ajustar e simples de ensinar. **Não precisa medir, desenhar ou cortar.** Com a eliminação desses passos, fica mais fácil ensinar sua utilização aos pacientes.

A Barreiras FormaFlex Forma Fácil pode ser ajustada a uma variedade de tamanhos e formatos de estomas. **Simples de Ajustar.**

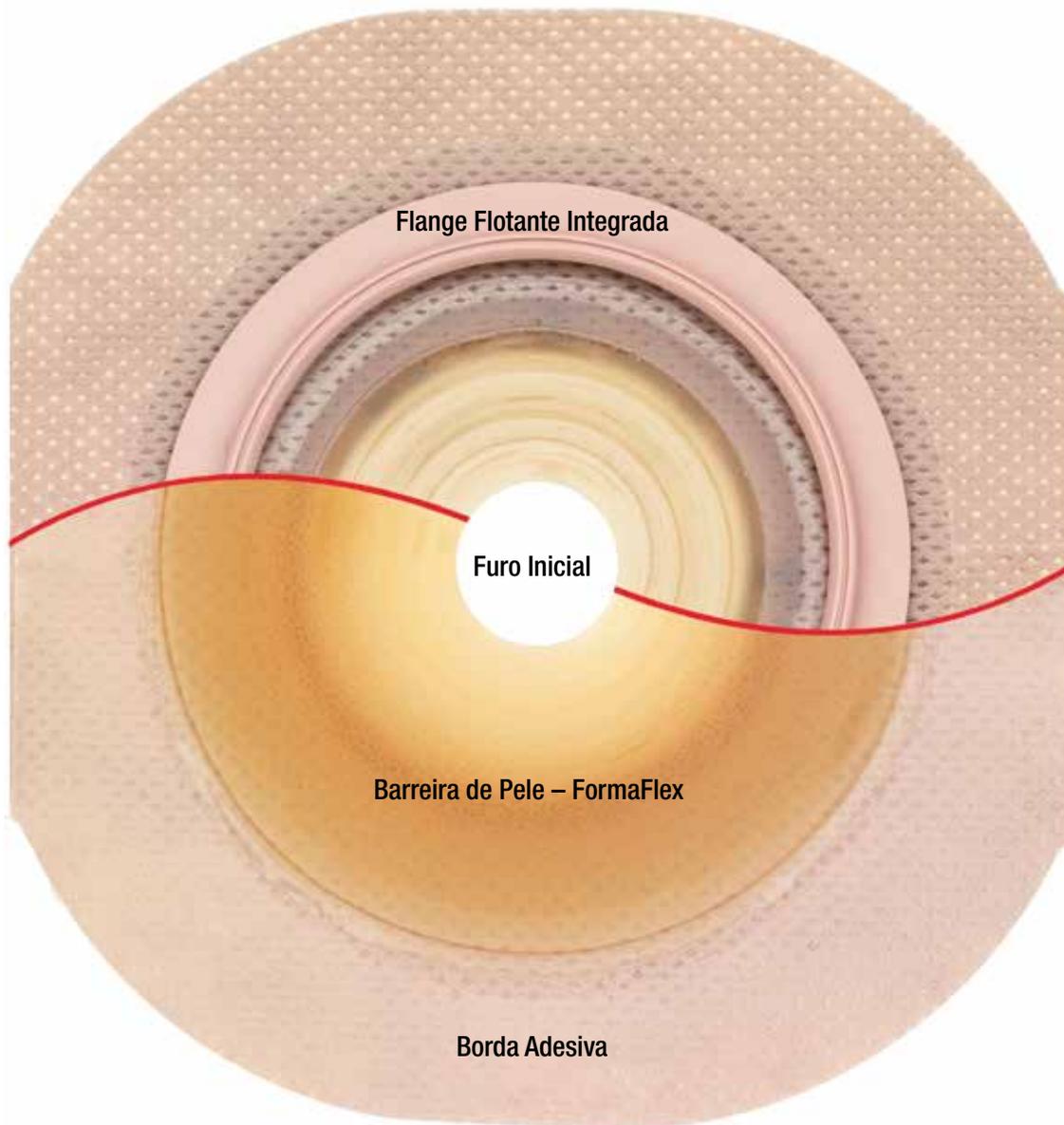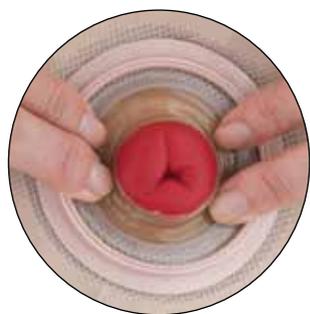

Design único



As ranhuras presentes nessa barreira oferecem ao paciente uma maneira fácil de criar um ajuste personalizado.

Possui efeito “não elástico”, ou seja, pode ser modelada e mantém o formato definido. É bastante resistente à erosão quando entra em contato com fluidos.



As ranhuras possibilitam que a barreira seja facilmente modelada.

Formulação Especial

A Barreira FormaFlex possui uma formulação especial que combina:

- **Microfibras macias e flexíveis.** Fornecem força para resistir à erosão, enquanto mantem a flexibilidade, podendo ser ajustada e modelada.
- **Mistura especial de hidrocoloides.** Absorve a umidade ajudando a manter a saúde da pele.
- **Elastômeros.** Asseguram a aderência e promovem um ajuste seguro aos contornos do abdome.

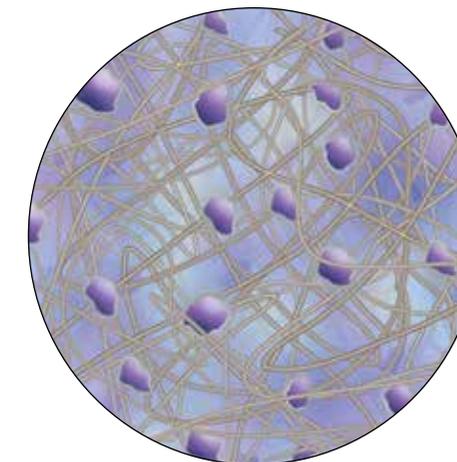


Ilustração Microscópica da Formulação da Barreira FormaFlex