

Guia do Usuário Cateteres VaPro Pocket™



1. Junte todos os materiais e prepare o local.

2. Lave as mãos conforme orientação do seu profissional de saúde.


3. Posicione-se para realizar o cateterismo intermitente. Remova as suas roupas para que você possa acessar sua genitália.




4. Para abrir a embalagem, insira o dedo no orifício superior, puxando-o para baixo e em sua direção.



5. Remova o cateter da embalagem. Deixe a embalagem vazia em seu colo, na pia ou em outra superfície plana. Mantenha o cateter sobre a embalagem aberta.

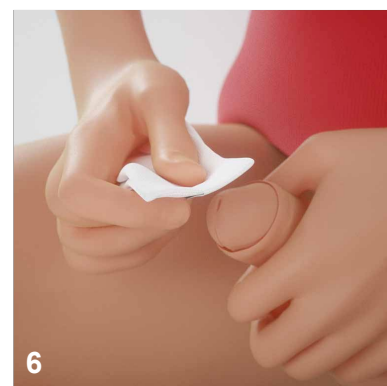


6. Segure seu pênis com sua mão não dominante e não o solte antes de terminar o procedimento. Puxe o prepúcio para trás (se houver) e limpe a glândula conforme orientado pelo seu profissional de saúde.

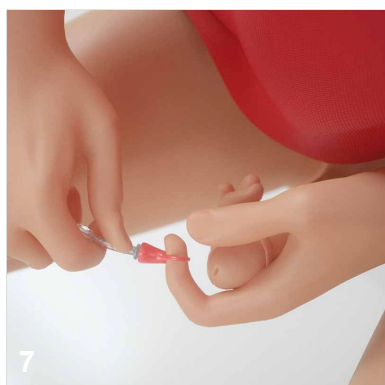

7. Remova a tampa da ponta protetora do cateter.

8. Segure o cateter com uma das mãos e, com a outra, direcione o cateter para a frente até que a ponta do cateter preencha a ponta protetora, tomando cuidado para que ele não saia da ponta.

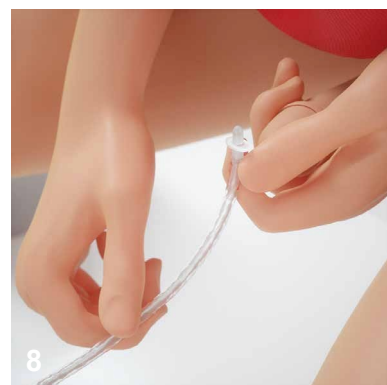


9. Segure o cateter abaixo da base da ponta protetora.

VaPro Pocket™
Cateter Intermitente Sem Toque



10. Usando os dedos e o indicador da sua mão não dominante, aperte o pênis suavemente para abrir a abertura uretral. Com a mão dominante, insira a ponta protetora até que a base entre em contato com a abertura uretral.

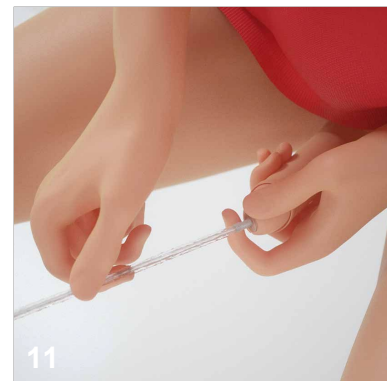

11. Empurre o cateter para frente até que a urina comece a fluir.



12. Assim que o fluxo de urina parar, retire lentamente o cateter. Se a urina fluir novamente, faça uma pausa até que a urina pare de drenar. Depois de ter certeza de que a bexiga está vazia, remova completamente o cateter. Reposicione o prepúcio (se houver).

13. Descarte o cateter e a embalagem em uma lixeira. **NÃO DESCARTE O PRODUTO NO VASO SANITÁRIO.**



14. Lave as mãos.

AVISO: Para reduzir o potencial de infecções e outras complicações, não reutilize o produto.

AVISO: Se ocorrer desconforto ou qualquer sinal de trauma, interrompa o uso imediatamente e consulte seu médico.

- Cateter intermitente de uso único, pronto para uso
- A ponta e a manga protetora possibilitam a técnica de inserção sem toque
- Extremidade final codificado por cores

- Cateter sem flato com revestimento hidrofílico
- 2 orifícios lisos para maior conforto na inserção e retirada do cateter
- Não é feito com látex de borracha natural

INDICAÇÕES DE USO

Este cateter intermitente é um dispositivo tubular flexível que é inserido através da uretra por pacientes do sexo masculino, feminino e pediátricos que precisam drenar a urina da bexiga.

PRECAUÇÃO: Consulte um profissional da saúde antes de usar este produto se alguma das seguintes condições abaixo estiver presente:

- Lesão na Uretra
- Estenose
- Uretrite - inflamação da uretra
- Epididimite - inflamação do epidídimo (tubo de testículo)
- sangramento uretral inexplicável
- Falso trajeto
- Prostatite - inflamação da próstata

PRECAUÇÃO: O autocateterismo deve seguir o plano de cuidados e conselhos dados pelo seu profissional de saúde e realizado somente de acordo com as instruções de uso fornecidas. Como a frequência do cateterismo varia de pessoa para pessoa, a frequência recomendada do seu cateterismo deve ser fornecida pelo seu profissional de saúde. Para quaisquer outras perguntas sobre o seu cateterismo, entre em contato com o seu profissional de saúde.

NOTA: Armazene as caixas em uma posição plana e em temperatura ambiente normal. Este produto consiste em: manga de poliuretano, ponta de elastômero termoplástico e tubulação não feita com DEHP.

Hollister do Brasil Ltda.
 Av. Jabaquara 2958
 7º andar – Conjunto 71 a 73
 São Paulo – SP
www.hollister.com.br