

A gama de opções de barreiras convexas

Barreiras convexas foram utilizadas para ajudar a fornecer um selo seguro e previsível para as bolsas. A escolha do produto é feita ao combinar a protuberância do estoma mais o contorno periostomal com a barreira apropriada. A curvatura para fora da barreira de pele convexa é desenhada para interagir diretamente com a pele periostomia.

Esta interação não depende somente da profundidade, rigidez e gradiente da barreira de pele convexa, mas também do formato e da rigidez da parede abdominal. Por exemplo, uma barreira flexível convexa consegue dobrar e se mover junto com o corpo; já a barreira convexa rígida não dobra, permanecendo sempre rígida. A escolha apropriada da barreira cabe à avaliação do paciente pelo enfermeiro e pelo conhecimento dos produtos de estomia disponíveis.

TIPO DE BARREIRA	POSSÍVEIS CENÁRIOS CLÍNICOS
 <p>Barreira de Pele Plana</p>	 <p>Barreira de Pele Plana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele periostomia plano • Protuberância adequada • Abertura do estoma no centro
 <p>Barreira de Pele Plana com Anel Redondo ou Oval Convexo</p>	 <p>Convexidade Flexível</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estoma retraído na pele • Pele periostomia irregular • Abertura do estoma fora do centro
 <p>Barreira Integrada Convexa Macia</p>	 <p>Convexidade Macia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leve pressão para melhor ajuste • Estoma retraído na pele • Ferimento periostomal
 <p>Barreira Integrada Convexa</p>	 <p>Convexidade Firme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vincos e dobras na pele periostomia • Abertura do estoma fora do centro • Estoma retraído abaixo do nível da pele
 <p>Barreira Convexa Integrada com Anel Redondo ou Oval Convexo</p>	 <p>Convexidade firme com maior profundidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estoma retraído ou rebaixado • Contorno abdominal irregular • Abertura do estoma fora do centro

A gama de opções de barreiras convexas

Referências:

- 1 J.C. Colwell, M.T. Goldberg, & J.E. Carmel (Eds). (2015). WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management. Chapter 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
- 2 JHoeflok, J et al. Use of convexity in ostomy care: Results of an International Consensus Meeting. JWOCN, January/February 2017

Para dúvidas, pedido de amostras ou perguntas clínicas detalhadas sobre nossos produtos entre em contato com o Programa QualiVida ligando no 0800-778-1000 ou então mandando um e-mail para qualivida@hollister.com.br

Faça acompanhamentos de rotina com o seu profissional de saúde.

Antes de usar algum produto ou acessório de estomia, leia as instruções de uso e as notas da embalagem.

O logo da Hollister and "Pele saudável. Resultados positivos." são marcas registradas da Hollister Incorporated.

© 2017 Hollister Incorporated.

Hollister do Brasil
Av. Jabaquara 2958, 7º
Andar
São Paulo - SP
04046-500

www.hollister.com.br

Programa QualiVida
0800-778-1000
qualivida@hollister.com.br