

Onde uma barreira convexa macia pode promover o melhor ajuste

Caso 1: Hérnia Paraestomal

A hérnia paraestomal pode criar uma protuberância no abdômen. Quando a convexidade é clinicamente indicada, uma barreira convexa firme pode representar potencial risco de danos à pele relacionados a pressão.

Uma barreira convexa macia pode ser uma solução apropriada



Caso 2: Abdômen rígido com lesão por pressão relacionado ao uso de convexidade firme ^{2,4}

As lesões por pressão podem ser mais comuns quando uma barreira convexa firme exercer pressão contra a pele por um longo período de tempo, principalmente com a adição de um cinto de estomia.

Uma barreira convexa macia pode fornecer o ajuste e remover a causa da pressão



Caso 3: estoma retraído ³

Uma barreira convexa firme pode não se ajustar aos contornos abdominais e forçar o descolamento quando usado em estomas retraídos.

Uma barreira convexa macia pode oferecer um ajuste mais apropriado



Caso 4: Estoma localizado em dobras abdominais ^{2,3}

As dobras abdominais podem comprometer a vedação da barreira. Uma convexidade macia pode melhorar o ajuste da barreira.

Uma barreira convexa macia pode combinar com a profundidade correta das dobras, adaptar-se aos contornos abdominais e fornecer menos pressão periestomal



Caso 5: Altura do estoma inferior a 20mm (2cm) ³

Um estoma que não apresenta protrusão pode causar problemas de vazamento sob a barreira de pele.

Uma barreira convexa macia pode fornecer a profundidade certa de convexidade para auxiliar na protrusão do estoma



Caso 6: Pós-operatório com distensão abdominal rígida e risco de separação mucocutânea ^{2,5}

Uma separação mucocutânea pode acontecer como resultado de infecção ou tensão excessiva na junção entre o estoma e a pele.

Uma barreira convexa macia pode ajudar a conseguir um ajuste correto com menos pressão na base do estoma



Caso 7: Estoma em alça ³

A abertura distal de um estoma em alça pode promover a saturação precoce da barreira pela saída constante de muco.

Uma barreira convexa macia ajuda a fornecer o ajuste correto com menos pressão ao redor do estoma, minimizando o risco de deslocamento do equipamento



Caso 8: Pioderma gangrenoso ^{2,4}

Um trauma na pele periestomia pode iniciar ou agravar um pioderma gangrenoso. A atenção deve ser voltada para o alívio da pressão e fricção.

Uma barreira convexa macia pode diminuir a quantidade de pressão aplicada a pele periestomia.



Onde uma barreira convexa macia pode promover o melhor ajuste

Barreiras Hollister Soft Convex



Sistema de uma peça Premier™ Soft Convex

Opções:

- Barreira de pele CeraPlus com tecnologia Remois
- Barreira de pele Flextend
- Recortável
- Pré-cortado
- Bolsa drenável
- Bolsa de urostomia



Sistema de duas peças New Image™ Soft Convex

Opções:

- Barreira de pele CeraPlus
- Recortável
- Pré-cortado



Anel convexo oval e redondo Adapt™

Opções:

- Barreira de pele Flextend com infusão de ceramidas
- Barreira de pele Flextend

Referências:

- 1 Turnbull, G. The Ostomy Files: Parastomal Hernia *Ostomy Wound Management* Volume 49- Issue 11 – November 2003
- 2 J.C. Colwell, M.T. Goldberg, & J.E. Carmel (Eds.). (2004). *Fecal & Urinary Diversions: Management Principles*. In Chapter 12 and Chapter 14. St. Louis, MO: Elsevier Mosby
- 3 J.C. Colwell, M.T. Goldberg, & J.E. Carvel (Eds.). (2015). *WOCN® Society Core Curriculum Ostomy Management*. In Chapter 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
- 4 J.E. Carmel, J.C. Colwell, M.T. Goldberg (Eds.), *WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management* p 181, 186. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2016
- 5 External Stoma and Peristomal Complications following Radical Cystectomy and Ileal Conduit Diversion: A Systematic Review - Szymanski, K.M., St-Cyr, D., Alam, T., Kassouf, W. *WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management*. p. 192. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. 2010

Para dúvidas, pedidos de amostras ou questões clínicas detalhadas sobre nossos produtos entre em contato com o Programa QualiVida ligando no 0800-778-1000 ou então mandando um e-mail para qualivida@hollister.com.br

Hollister do Brasil
Av. Jabaquara 2958, 7º
Andar
São Paulo - SP
04046-500

www.hollister.com.br

Programa QualiVida
0800-778-1000
qualivida@hollister.com.br

Faça acompanhamentos de rotina com o seu profissional de saúde

Antes de usar algum produto ou acessório de estomia, leia as instruções de uso e as notas da embalagem.

O logo Hollister, Adapt, New Image, Premier e "Pele Saudável. Resultados Positivos." são marcas da Hollister Incorporated. © 2020 Hollister Incorporated. 923116-0220 US-00193



*Remois é uma tecnologia
da Alcare Co., Ltd.