

Aplicação e Cuidados Diários

6 passos simples


1. Preparo da pele

- Pele seca, livre de umidade e resíduos oleosos.

2. Retire os protetores do adesivo


- Retire os protetores do adesivo das barreiras de hidrocoloide.

3. Coloque o dispositivo

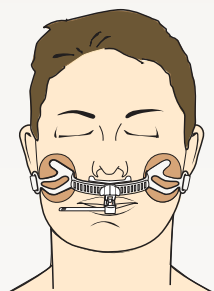


- A espuma não absorvente deve apenas tocar a pele do lábio superior do paciente.
- Pressione as barreiras por 30 segundos na pele para melhorar a adesividade.

4. Ajuste da tira acolchoada

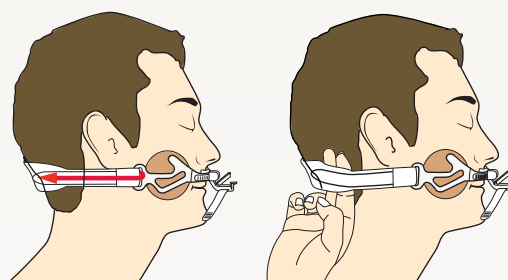


- Não aperte demasiadamente. Deixe um espaço de dois dedos entre a tira acolchoada e a nuca.

5. Fixação do tubo orotraqueal

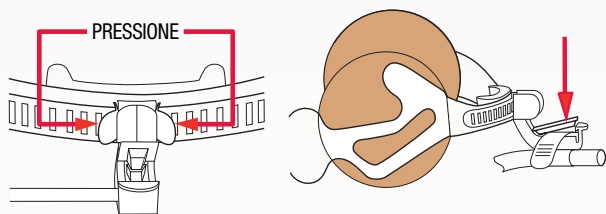

- Pressione as linguetas e deslize a pinça pelo trilho até a localização do tubo orotraqueal.
- Abraçee o tubo orotraqueal com a tira auto adesiva.
- Feche a pinça.

6. Cuidado Rotineiro

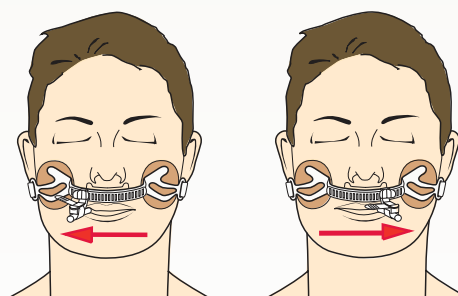

- Deslize a pinça na direção desejada, REPOSICIONE a cada 2 horas ou de acordo com a necessidade.

PRECAUÇÕES. Para mais detalhes, assegure-se de ler as Instruções de Uso antes da sua aplicação. Anchor Fast® não foi desenvolvido para ser utilizado em: a) Pacientes pediátricos, b) Pacientes com ausência de dentição superior, c) Paciente com feridas faciais extensas que impeçam a adesividade do dispositivo. Sempre consulte o **PROTOCOLO** vigente. Este dispositivo é de uso único, **NÃO REUTILIZE**.